

使用方法

- ワipesを取り出し、環境表面を拭いてください。
- 人体・食器・食品の清拭には使用しないでください。
- 表面が十分濡れていることを確認し、自然に乾燥させてください。二度拭きは不要です。

使用範囲

- 非侵襲性医療機器の表面 ●モニター、タクトレス、スタートボタン、キーボード
- 車椅子、血圧計、採血台、点滴台 ●手術台、処置台、无影灯

使用上の注意

- ご使用前に製品安全シート(SDS)を参照してください。●人体には使用しないでください。
- 使用後はワipesをしっかり閉めてください。●ワipesをトイレに流さないでください。
- 開封後は1か月以内に使用してください。●熱、直射日光、霜を避けてください。
- 容器は入れ替えず、室温で保存してください。●幼児の手の届かないところに保管してください。●熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。
- 機器などに使用する場合は、目立たない部分で試してからお使いください。
- PC等、精密機器に使用する際は、その機器の取扱説明書等で清掃方法をご確認の上、ご使用ください。●広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

洗淨・除菌クロス マイクロジッド mikrozid® universal wipes premium

洗淨・除菌クロス mikrozid® universal wipes premium

火気注意 アルコール含有

PC等、精密機器に使用する際は、その機器の取扱説明書等で清掃方法をご確認の上、ご使用ください。

schülke +

独自の処方と特殊なクロスで **400%含浸**

洗淨・除菌クロス mikrozid® universal wipes premium

120枚 200 x 200mm

火気注意 アルコール含有

●血液・タンパク汚れも しっかりふき取り、洗淨と除菌が同時に

●細菌・ウイルスを99.99%除去 (EN16615試験等クリア)*1

●パッチテスト済み *2 *1 全ての菌を除去するわけではありません。 *2 全ての方に刺激が起こらないということではありません。

© 丸石製薬株式会社

マイクロジッド **プレミアムワイプ** 洗淨・除菌クロス mikrozid® universal wipes premium

品名: マイクロジッドプレミアムワイプ

用途: 環境表面の洗淨および除菌

成分: エタノール・ポリオキシアルキレン界面活性剤ほか

サイズ: 200x200(mm) 枚数: 120枚

発売元: シュルケ・ジャパン合同会社

販売元: 丸石製薬株式会社

【問合せ先】丸石製薬株式会社 学術情報部

大阪府鶴見区今津中2-4-2 TEL:0120-014-561

4 987211590116

FW-SKUW120-RE04

応急処置

- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。●なお、症状が重い場合は、眼科医の診察を受けてください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。●内容物、容器は地域の規則に従って廃棄してください。

含浸液について

- 引火性の液体および蒸気 ●強い眼刺激 ●飲み込むと発がんのおそれ
- 飲み込むと生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●吸入すると臓器(中枢神経系)の障害
- 長期にわたる、又は反復ばく露(吸入)による臓器(肝臓、血液への影響)の障害