

# グルタール製剤

(内視鏡専用殺菌消毒剤)

劇 STERISCOPE<sup>®</sup>  
ステリスコープ<sup>®</sup>3<sup>W/V</sup>%液

開封日 年 月 日

5L

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

3  
W/V%

## 折りたたみ説明図

**注意：**折りたたむ際には液が残っているおそれがありますので取り扱いには注意してください。  
(ラベルに記載されている注意及び添付文書の使用上の注意をご参照願います。)

省資源化・ゴミの削減化の為、折りたたんで捨てられる減容容器を使用しています。



①両手で上から押さえる様に容器の空気を抜きながら、折り目に沿ってたたみます。



②③上下を内側に折りたたみます。



④空気が入らない様にキャップをしめます。



工場用コード



# ステリスコープ<sup>®</sup>3<sup>w/v</sup>%液

有効成分：グルタラル（グルタルアルデヒド）3.09w/v%（緩衝化剤 150mL 添付）  
調製法：用時、本品1Lに緩衝化剤30mLを混和し、青色～淡青色澄明の液として希釈せずに使用する。

## 注意

- (1) 人体に使用しないこと。
- (2) 本剤の成分又はアルデヒドに対し過敏症の既往歴のある者は、本剤を取り扱わないこと。
- (3) 本剤は必ず換気状態のよいところで、ゴーグル、防水エプロン、マスク、ゴム手袋等の保護具を装着して使用し、吸入、吸引、接触しないように注意すること。万一、接触したときは直ちに多量の水で洗い流し、特に眼に入った場合などは、専門医の処置を受けること。
- (4) 浸漬用容器にはふたをすること。
- (5) 内視鏡に付着した体液等を除去するための予備洗浄を十分に行ってから使用すること。
- (6) 消毒終了後は多量の水で本剤を十分に洗い流すこと。

貯 法：遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存。（氷結時、常温で自然に溶かすこと。）

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

〈調剤包装単位用コード〉



〈販売包装単位用コード〉



# グルタラール製剤

(内視鏡専用殺菌消毒剤)

劇 STERISCOPE<sup>®</sup>  
ステリスコープ<sup>®</sup>3<sup>W/V</sup>%液

5L

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

3

W/V%

## 折りたたみ説明図

**注意：**折りたたむ際には液が残っているおそれがありますので取り扱いには注意してください。(ラベルに記載されている注意及び添付文書の使用上の注意をご参照願います。)


省資源化・ゴミの削減化の為、折りたたんで捨てられる減容容器を使用しています。



①両手で上から押さえる様に容器の空気を抜きながら、折り目に沿ってたたみます。



②③上下を内側に折りたたみます。

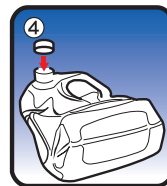

④空気が入らない様にキャップをしめます。



キャップ:PP  
ボトル:PE  
ラベル:PE  
袋:PE

# ステリスコープ<sup>®</sup>3<sup>w/v</sup>%液

有効成分：グルタラル（グルタルアルデヒド）3.09w/v%（緩衝化剤 150mL 添付）  
調製法：用時、本品1Lに緩衝化剤30mLを混和し、青色～淡青色澄明の液として希釈せずに使用する。

## 注意

- (1) 人体に使用しないこと。
- (2) 本剤の成分又はアルデヒドに対し過敏症の既往歴のある者は、本剤を取り扱わないこと。
- (3) 本剤は必ず換気状態のよいところで、ゴーグル、防水エプロン、マスク、ゴム手袋等の保護具を装着して使用し、吸入、吸引、接触しないように注意すること。万一、接触したときは直ちに多量の水で洗い流し、特に眼に入った場合などは、専門医の処置を受けること。
- (4) 浸漬用容器にはふたをすること。
- (5) 内視鏡に付着した体液等を除去するための予備洗浄を十分に行ってから使用すること。
- (6) 消毒終了後は多量の水で本剤を十分に洗い流すこと。

貯 法：遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存。（氷結時、常温で自然に溶かすこと。）

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

