

酵素系洗浄剤

ステリザイム® S

STERIZIME® S


5L

㊤ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

S 7747147

空気穴 (オレンジ矢印部分) の取り扱い

- 空気穴 (オレンジ矢印部分) は空気圧を調節するためのものであり、使用時にはキャップをはずして、使用後はしっかりと閉めてください。
- 容器の傾けの程度により空気穴から液が漏れることがありますので、液をそく際、空気穴に液が触れないように注意してください。

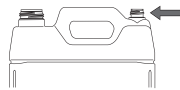

キャップ PPE
ボトル PPE
ラベル PPE

ステリザイム® S

ステリザイムSは、蛋白分解酵素 (プロテアーゼ) を含有する洗浄剤であり、各種医療機器・器具に付着した血液、粘液、脂肪等の汚れを効果的に落とすことができる酵素系洗浄剤です。

●特長

1. 各種医療機器・器具の汚れを短時間で効果的に洗浄します。
2. ブラッシングでは除去しにくい器具の細部の汚れを短時間で分解し、除去します。
3. 臭いが少なく低泡性ですすぎ洗いも短時間で簡単に行えます。
4. 各種洗浄機等にも使用可能です。
5. 金属、ガラス、ゴム、プラスチック等の各種素材に対する腐食性は、ほとんどありません。
6. 無リンタイプで環境に優しい洗浄剤です。

●使用方法

医療機器・器具

(1)ステリザイムS洗浄液の調製

医療機器・器具が完全に浸漬できる容器を用い、ステリザイムS原液に水又は40℃の温水を加えて100倍に希釈し、ステリザイムS洗浄液 (1%水溶液) を調製します。

(2)ステリザイムS洗浄液への浸漬

医療機器・器具に付着した血液、固形物などの目に見える汚れはあらかじめガーゼ等で清拭するか流水で洗い流し、通常2〜5分間ステリザイムS洗浄液に浸漬します。(浸漬時間は、汚れの程度に応じて延長します。) また、内視鏡はすべてのチャンネル内にステリザイムS洗浄液を満たすようにします。

(3)すすぎ

浸漬後の医療機器・器具は、乾燥せずに直ちに水道水、精製水等ですすぎます。また、内視鏡のチャンネル内は、水道水、精製水等の吸引・注入を繰り返します。

- *1) 各種洗浄機等をご使用の場合は、それぞれ、メーカー指定の方法に従ってご使用下さい。
- *2) 洗浄液は1日1回必ず交換して下さい。

●注意

1. 殺菌・消毒剤と混合しないように注意して下さい。
2. 本品には消毒・滅菌効果はありません。
3. 本品を直接取り扱う際には、手袋等を着用して下さい。
4. 本品を皮膚に付着したまま長時間放置しないで下さい。
5. 損傷防止のために、保管、取り扱いには十分注意して下さい。万一損傷した場合には、牛乳を飲んで専門医の指示を受けて下さい。また、目に入った場合には、直ちに多量の清水で洗い流し、専門医の指示を受けて下さい。
6. 高温、多湿の場所での保管は避けて下さい。
7. 子供の手の届かない所に保管して下さい。

折りたたみ説明図

注意：折りたたむ際には液が残っているおそれがありますので取り扱いには注意してください。(ラベルに記載されている注意をご参照願います。)

省資源化・ゴミの削減化の為、折りたたんで捨てられる減容容器を使用しています。



①両手でも上から押さえる様に容器の底を潰しながら、折り目に沿ってたたみます。



②金上下を内側に折りたたみます。



④空気が入らない様にキャップをしめます。