

応急処置
●目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。●なお、症状が重い場合は、眼科医の診察を受けてください。
●体に異常が現れた時は、使用を中止してください。●内容物、容器は地域の規則に従って廃棄してください。

含浸液について
●引火性の液体および蒸気 ●強い眼刺激 ●飲み込むと発がんのおそれ
●飲み込むと生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●吸入すると臓器(中枢神経系)の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露(吸入)による臓器(肝臓、血液への影響)の障害

品名:マイクロジッドプレミアムワイブ
用途:環境表面の洗浄および除菌
成分:エタノール・イソプロパノール、
界面活性剤ほか
サイズ:200×200(mm) 枚数:120枚
Made in Vietnam
発売元:シュルケ・ジャパン合同会社
販売元:丸石製薬株式会社
【お問合せ先】丸石製薬株式会社 学術情報部
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL:0120-014-561



●血液・タンパク汚れも
しっかりと取り除き、同時に
細菌・ウイルスを99.99%除去
(EN16615試験等クリア)
※1 全ての面を除去するわけではなく、※2 全ての面に除去が認められないといふことではありません。

120枚
200×200mm

火気注意
アルコール含有

© 丸石製薬株式会社

400%含浸
独自の処方と特殊なクロスで

schülke

こちらの面を上にしてお使いください。

**マイクロジッド
プレミアムワイブ**
洗浄・除菌クロス
mikrozid®
universal wipes premium

PC等、精密機器に使用する際は、その機器の取扱説明書等で清掃方法をご確認の上、ご使用ください。

火気注意 アルコール含有

洗浄・除菌クロス マイクロジッド プレミアムワイブ mikrozid® universal wipes premium

使用方法
●ワイブを取り出し、環境表面を拭いてください。
●人体・食器・食品の清拭には使用しないでください。
●表面が十分濡れていることを確認し、自然に乾燥させてください。二度拭きは不要です。

使用範囲
●テーブル、ベッド柵、ドアノブ、合成皮革ソファ、手すりなどの高頻度接触面
●非侵襲性医療機器の表面 ●モニター、タブレット、スマートフォン、キーボード
●車椅子、血圧計、採血台、点滴台 ●手術台、処置台、無影灯

使用上の注意
●ご使用前に製品安全データシート(SDS)を参照してください。●人体には使用しないでください。●使用後はフタをしっかりと閉めてください。●ワイブをトイレに流さないでください。●開封後は1か月以内に使用してください。●熱、直射日光、霜を避けてください。●容器は入れ替えず、室温で保存してください。●幼児の手の届かないところに保管してください。●熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。●機器などに使用する場合は、目立たない部分で試してからお使いください。●PC等、精密機器に使用する際は、その機器の取扱説明書等で清掃方法をご確認の上、ご使用ください。●広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。