

ウエルフォーム® 専用電動ディスペンサー TFII ULTRA

取扱説明書







Ⓜ 丸石製薬株式会社

保証

万が一、故障した場合は、弊社担当者に交換の可否を確認してください。
保証には、電池、誤使用による故障、事故による故障（電池による損傷含む）、改造、などの、間接的な損害は一切含まれません。

ご注意ください

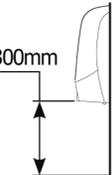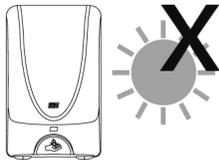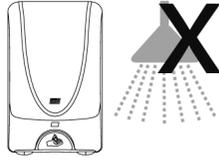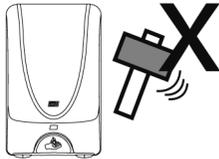
<p>①設置場所の横および下に十分な余裕があることを確認してください。</p>	<p>200mm - 300mm</p> 
<p>②直射日光が当たる場所は避けてください。 紫外線で外観が劣化するおそれがあります。</p>	
<p>③気温が 40 度以上、5 度以下になる場所は避けてください。</p>	
<p>④水にさらしたり湿度の高いところに設置したりしないでください。 浴室、サウナ、蒸気を発するシンクの上には適しません。</p>	
<p>⑤破壊行為や、邪魔になる場所への設置は避けてください。</p>	

鍵とボタン

- 1** ディスペンサーを開けるための鍵とボタンが同梱されていることを確認してください。鍵はディスペンサーを開けるたびにお使いいただくためのものです。鍵を紛失する心配がある場合はボタンを取り付けてお使いいただくこともできます。ただし、ボタンを取り付けた状態で壁に設置した場合、ボタンを取り外すことはできません。



- 2** 1. 鍵またはボタンを背面に取り付けます。
2. 鍵またはボタンを押し、ディスペンサーを開けます。

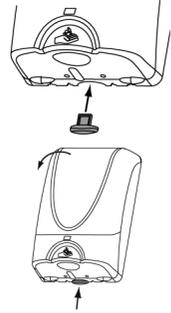


トレイの設置


このディスペンサーには専用のトレイを付けることができます。ディスペンサーを設置する前に取り付けて下さい。




- 1** ディスペンサーの背面に取り付けます。

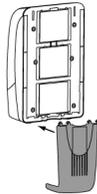

- 2** ディスペンサーの背面にぴったり付いていることを確認してください。

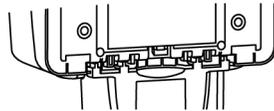

- 3** ディスペンサーを付属の粘着テープかねじで取り付けてください。

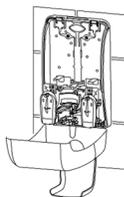


- 4** ねじで留めるとより固定されます。



設置 - 粘着テープ


ディスペンサーに付属の粘着テープを使用する方法です。

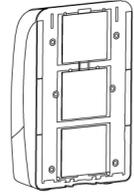


- 1** 付属のウェットティッシュで設置する場所を拭きます。




- 2** 付属の鍵またはボタンでディスペンサーを開け、中の装置を取り出します。(4ページをご参照下さい)

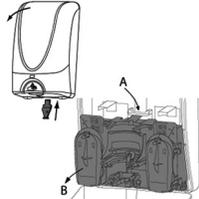

- 3** 粘着テープの紙をはがします。

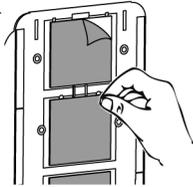


- 4** 強く押しつけ、5分ほどしてから装置およびカートリッジを取り付けて下さい。

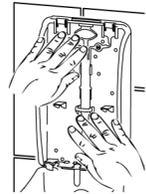


注意！ 装置はディスペンサーのカバーを閉じる前に元に戻して下さい。

設置 - ねじ

付属のねじセットを使用します。

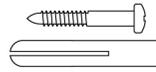


- 1** コンクリートやタイルなど、ねじが止まりにくい材質の場合は、あらかじめ直径 6mm の穴を開け、その穴にコンクリートアンカー（プラスチックのねじ止め）をねじ込みます。

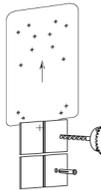


- 2** 付属の鍵またはボタンでディスペンサーを開けます。



- 3** タブ A を押し、B を外側に回転させ、装置を取り出します。(4ページをご参照下さい)

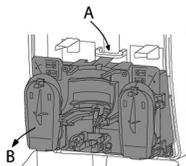

- 4** 4 隅をねじでしっかりと固定します。

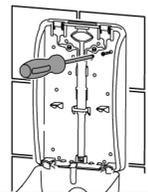

注意！ 装置はディスペンサーのカバーを閉じる前に元に戻して下さい。

電池


単一電池アルカリ乾電池推奨を 4 本使用します。




1 付属の鍵またはボタンでディスペンサーを開けます。



2 電池カバーを開けます。

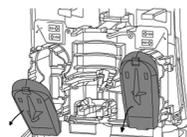

3 両側に 2 つずつ、計 4 つの単一電池を入れます。

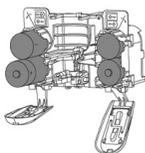

4 電池カバーを閉じます。



カートリッジ

このディスペンサーには専用のカートリッジのみお使いいただけます。




1 キャップを取り外します。



2 付属の鍵またはボタンでディスペンサーを開けます。



3 カートリッジのラベルが見えるようにディスペンサーに取り付けます。

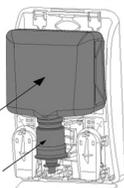

4 ディスペンサーカバーを閉じます。



5 1 回手をかざして、製剤が出てくるようにします。



6 もう 1 回手をかざして、適量が出てくるようにします。



お手入れ


外観をきれいに保つため、下記にご注意下さい。

- ・ 拭き掃除には、研磨剤が入っていない布を湿らせてご使用ください。頑固な汚れは、湿らせた布に石けんを含ませて拭き取ってください。

故障や損傷を防ぐため、下記にご注意ください。

- ・ ホースで水をかけたり、加圧洗浄機やスチームクリーナーを使用したりしないでください。
- ・ 研磨剤入り洗剤を使用しないでください。
- ・ 洗浄用溶剤を使用しないでください。
- ・ 苛性や酸性の洗剤を使用しないでください。

技術仕様

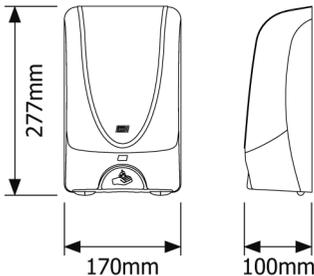

縦 277mm、横 170mm、幅 100mm
総重量 2.9kg (電池 4 本と未開封のカートリッジを取り付けた場合)

	EN60601-1-2:2001 準拠
	WEEE (廃電気電子機器指令) 準拠
	RoHS (特定有害物質使用制限指令) 準拠

トラブルシューティングとFAQ

ディスペンサーが作動しない。

- 電池が入っていない (4ページをご参照ください)
- 電池交換が必要 (4ページをご参照ください)
- 電池が正しく取り付けられていない (4ページをご参照ください)
- カートリッジが空になり交換が必要 (4ページをご参照ください)
- カートリッジが正しく取り付けられていない (4ページをご参照ください)
- ディスペンサーの下に物がある (1ページをご参照ください)

センサーに触れなくてもディスペンサーが作動する。

- 不適切な場所に設置すると、誤作動のおそれがあります
(1ページをご参照ください)

万が一問題があれば、カートリッジおよび電池を含む全部品を、弊社担当者にご返品いただき、交換の可否を確認してください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

丸石製薬ホームページ

<http://www.maruishi-pharm.co.jp/>